



COAGULATION CAL

Calibrator / Calibrador

Coagulation / Coagulación

Định lượng các yếu tố đông máu IVD

Lưu trữ: 2 – 8°C

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Bộ hiệu chuẩn là huyết tương người đông khô, chứa PT, APTT và Fibrinogen cho phép biểu thị kết quả phân tích theo các đơn vị khác nhau như nồng độ (mg / dL), tỷ lệ phần trăm (%) hoặc tỷ lệ hoạt động, bằng phương pháp thủ công.

HÓA CHẤT

Bộ hiệu chuẩn. Huyết tương người. Natri azide 0,95 g / L.
Nồng độ các yếu tố đông máu được chỉ định dưới đây.

THẬN TRỌNG

Các thành phần này có nguồn gốc từ người đã được kiểm tra và tìm thấy âm tính với HBsAg, HCV và kháng thể HIV (1/2). Tuy nhiên phải thận trọng tránh lây nhiễm.

CALIBRATION

Giá trị tham chiếu đã được tính toán từ một nhóm plasma bình thường.

PHA CHẾ

- Pha loãng với 1 mL nước cất.
- Trộn đều, tránh tạo bọt
- Để ở nhiệt độ phòng khoảng 30 phút trước khi sử dụng

LƯU TRỮ VÀ ỔN ĐỊNH

Lọ Calibrator ổn định cho đến ngày hết hạn trên nhãn khi đóng kín ở 2-8°C và các chất gây ô nhiễm đã được ngăn ngừa trong quá trình sử dụng. Không sử dụng chất thử trong ngày hết hạn. Sau khi pha loãng, ổn định 4 giờ ở nhiệt độ phòng (15 ~ 25°C) hoặc 24 giờ -20°C nếu đóng băng ngay lập tức.

QUY TRÌNH

Được sử dụng cho các xét nghiệm đo độ đục.

ĐÓNG GÓI

REF 1709101 Cont. 4 x 1 mL