


Ống Capillary - 5 μ L

Kích thước

Dài \times Rộng: 23.4 mm \times 5.5 mm

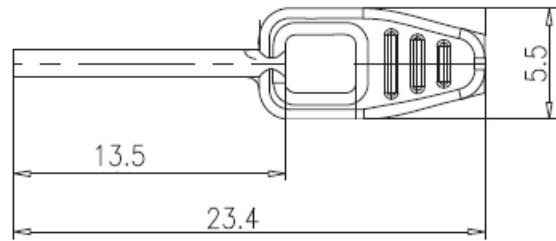

Hướng dẫn sử dụng

A. Chuẩn bị

1. Kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi sử dụng.
2. Vui lòng không sử dụng sản phẩm bị hư hỏng.

B. Sử dụng

1. Khử trùng vị trí cần lấy máu, để lấy mẫu máu sử dụng kim chích hoặc thiết bị chích lấy máu.
2. Lau sạch giọt máu đầu tiên và sử dụng giọt máu thứ 2.
3. Giữ tay cầm của ống capillary và đặt đầu còn lại của ống vào giọt máu. Đợi cho đến khi ống đầy máu.
4. Chắc chắn rằng ống phải đầy máu. Kiểm tra xem máu có bị tràn ra bên ngoài ống không.
5. Làm sạch máu còn lại ở vị trí lấy máu. Vứt bỏ ống capillary sau khi đã sử dụng.

C. Bảo quản sau khi sử dụng

1. Giữ các ống capillary còn lại trong hộp và lưu trữ ở nhiệt độ và độ ẩm hợp lý.

Cảnh báo

- Sử dụng găng tay sử dụng 1 lần và mang dụng cụ bảo hộ.
- Không được sử dụng sản phẩm khi hết hạn sử dụng.
- Sản phẩm này chỉ sử dụng 1 lần. Hãy xem như là những vật có khả năng lây nhiễm, và vứt bỏ ở những nơi an toàn.
- Không được lưu trữ ở nơi có độ ẩm cao, không tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời.
- Vứt bỏ ngay sản phẩm khi thấy sản phẩm bị dơ, hư hỏng.
- Khi lấy mẫu máu, mẫu máu phải đầy ống và không có tạo bong bóng.

 **GREEN CROSS MEDIS Corp.**

16, Jeongja 1-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-gu,
Cheonan-si, Chungcheong nam-do, Korea