

Quy trình

- Mục đích sử dụng
 - Mẫu chuẩn Labona Check A1c chứa Hemoglobin của người.
 - Mẫu chuẩn Labona Check A1c chỉ được sử dụng trên máy phân tích HbA1c LabonaCheck A1c và bộ test đo HbA1c LabonaCheck A1c. Chỉ khi chạy mẫu máu chuẩn nằm trong dải cho phép thì kết quả kiểm tra mới có thể chấp nhận.

- Phạm vi cho phép (Có sự khác nhau giữa các LOT)

	%HbA1c
Control Solution 1	6,0% ± 1,5%
Control Solution 2	11,0% ± 2,0%

- Quy cách đóng gói
 - Mẫu Control Solution 1: 1x1,5ml – Mức trung bình
 - Mẫu Control Solution 2: 1x1,5ml – Mức cao
 - Tờ HSSD
- Cảnh báo và chú ý
 - Chỉ sử dụng trong chuẩn đoán IVD
 - Sử dụng găng tay và các phụ kiện bảo vệ khi tiếp xúc với mẫu máu chuẩn LabonaCheck A1c
 - Mẫu máu chuẩn LabonaCheck A1c có nguồn gốc từ máu, vì thế nên xử lý như những mẫu bệnh phẩm có khả năng gây nhiễm bệnh.
 - Không được sử dụng mẫu máu chuẩn LabonaCheck A1c khi đã hết hạn dùng.
 - Loại bỏ những lọ khi thấy có dấu hiệu nhiễm khuẩn và nhiễm nấm
 - Không được sử dụng mẫu máu chuẩn LabonaCheck A1c với thiết bị đo HbA1c và các phụ kiện của hãng khác.

Lưu trữ và ổn định

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng và lưu trữ ở nhiệt độ trên 8°C
- Không được làm đông mẫu
- Khi chưa mở nắp
 - Mẫu chuẩn sẽ sử dụng đến hết hạn nếu được lưu trữ ở nhiệt độ 2°C ~ 8°C.
- Khi đã mở nắp
 - Mẫu chuẩn sẽ ổn định trong 30 ngày sau khi mở nắp lần đầu tiên nếu được lưu trữ ở nhiệt độ 2°C ~ 8°C. Vui lòng ghi ngày mở nắp đầu tiên lên lọ.
 - Mẫu chuẩn khi đã mở nắp, nên đặt theo chiều đứng khi lưu trữ
 - Lưu trữ mẫu chuẩn ở nhiệt độ 2°C ~ 8°C sau khi sử dụng.

Quy trình sử dụng

- Lấy lọ máu chuẩn LabonaCheck A1c ra khỏi tủ đông và đặt ở nhiệt độ phòng khoảng 30 phút cho mẫu ổn định.
- Lắc nhẹ lọ ít nhất 10 giây cho mẫu trộn đều
- Tháo nắp lọ và sử dụng ống mao dẫn để hút mẫu
- Lau sạch bên ngoài cổ của lọ chuẩn và đậy nắp lại
- Mẫu máu chuẩn LabonaCheck A1c cũng được thực hiện giống như các mẫu bệnh nhân. Xem quy trình đo trong quyền HDSD của máy HbA1c LabonaCheck A1c.

Chú ý

- Phạm vi cho phép cho phân tích sử dụng với thiết bị đo HbA1c LabonaCheck A1c và Bộ test đo HbA1c LabonaCheck A1c đã được nêu ở bên trên. Giá trị đo phải nằm trong phạm vi cho phép. Chạy lại mẫu chuẩn nếu kết quả nằm ngoài phạm vi cho phép. Thực hiện lại mẫu đo khác với lọ chuẩn mới nếu kết quả đo vẫn nằm ngoài phạm vi cho phép. Không tự động điều chỉnh máy. Nếu lỗi vẫn còn, vui lòng liên hệ với nhà phân phối.

Thông tin về các biểu tượng

	Chỉ dùng trong chuẩn đoán IVD
	Lô hàng
	Mã hàng
	Giới hạn nhiệt độ
	Hạn dùng
	Cảnh báo, Tham khảo tài liệu kèm theo
	Xem hướng dẫn sử dụng
	Nhà máy sản xuất

GREEN CROSS MEDICAL SCIENCE

Manufactured by GREEN CROSS MEDIS CORP.
 Distributed by GREEN CROSS MEDICAL SCIENCE CORP.
 H.Q. : 107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 446-770, Korea
 Tel. : +82-31-260-0965, 0969
 Fax : +82-31-260-9416
 E-mail : gcms.overseas@greencross.com
 http://www.greencrossms.com/

