

KHOA XÉT NGHIỆM BỆNH VIỆN TÂN TRỤ	QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN	Trang: 2/2
	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM HETTICH – EBA 20	Mã số: Ngày ban hành: 01/08/2015
	Bộ phận: PHÒNG XÉT NGHIỆM	Lần thay thế:

Soạn thảo

Ngày:// 2015

(Đã ký)

Kiểm tra

Ngày:// 2015

(Đã ký)

Phê duyệt

Ngày:// 2015

(Đã ký)

KTV:

CNXN:

GĐ:

Nơi nhận:

- Khoa xét nghiệm
- Phòng xét nghiệm

KHOA XÉT NGHIỆM BỆNH VIỆN TÂN TRỤ	QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN	Trang: 2/2
	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM HETTICH – EBA 20	Mã số: Ngày ban hành: 01/08/2015
	Bộ phận: PHÒNG XÉT NGHIỆM	Lần thay thế:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Để đảm bảo công tác vận hành được thực hiện đồng bộ để đạt được sự ổn định về mặt chất lượng sản phẩm, vận hành an toàn và hiệu quả đối với thiết bị.

II. PHẠM VI ỨNG DỤNG

Quy trình được áp dụng trên máy ly tâm **HETTICH – EBA 20** đặt tại phòng xét nghiệm.

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tất cả kỹ thuật viên phòng xét nghiệm

IV. CÁC BƯỚC VẬN HÀNH MÁY

1. Kiểm tra nguồn điện và cắm phích điện vào nguồn điện.
2. Bật công tắc **ON** phía sau máy.
3. Chọn số vòng quay tại màn hình điện tử RPM * 100 bằng hai nút “▲” và “▼”.
4. Chọn thời gian quay tại màn hình điện tử “t” bằng hai nút “▲” và “▼”.
5. Nhấn **Start**. “bắt đầu quay” quay xong máy tự dừng.
6. Trong khi đang ly tâm có sự cố thì nhấn Stop (dừng lại chỉnh sửa song tiếp tục ly tâm).
7. Sau khi chạy xong tắt công tắc phía sau và rút dây nguồn.

V. GHI CHÚ SỬA ĐỔI

Ngày sửa đổi	Lý do sửa đổi	Ngày ban hành lại	Ghi chú