



WASHING SOLUTION

WASHING SOLUTION

GIỚI THIỆU

- Dung dịch rửa Washing Solution dùng để rửa kim hút mẫu cho các dòng máy sinh hóa tự động.

CHUẨN BỊ VÀ SỬ DỤNG

- Pha loãng: Dung dịch được pha loãng với nước cất theo tỷ lệ: 1/10 (1 lít dung dịch washing solution với 10 lít nước cất)
- Dung dịch rửa Washing solution: Dùng để rửa kim và hệ thống hút mẫu.

BẢO QUẢN VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH

- Dung dịch lưu trữ ở nhiệt độ 15-25°C sẽ được sử dụng cho đến khi thời hạn ghi trên nhãn. Không sử dụng dung dịch này sau khi hết hạn.

THÀNH PHẦN

- Dung dịch muối NaN_3 (<0,1%)
- Triton (0.002mL / L)

THẬN TRỌNG

- Không được tái sử dụng.
- Xử lý chất thải: theo quy định hiện hành

ĐÓNG GÓI

- Mã hàng: 1009020 2 x 250 mL

